



游离脂肪酸检测试剂盒 (ACS-ACOD 法) 使用说明书

【产品名称】

通用名称: 游离脂肪酸检测试剂盒 (ACS-ACOD 法)

英文名称: Non-esterified fatty acids Kit(NEFA)

【包装规格】




规格组成	适用仪器
25mL(试剂1: 1×20mL + 试剂2: 1×5mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、006、008AS; 贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800; 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR; 罗氏: MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702; 美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L7280、MS-L8060、MS-L8000; 贝克曼: LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9; 希森美康: CHEMIX-180、CHEMIX-800、BM-6010/C、BX-3010、BX-4000; 雅培 C16000、ci4100、ci8200、ci16200; 西门子: ADVIA2400、ADVIA XPT、ADVIA1800
50mL(试剂1: 1×40mL + 试剂2: 1×10mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、006、008AS; 贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800; 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR; 罗氏: MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702; 美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L7280、MS-L8060、MS-L8000; 迈瑞: BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800、BS-2000M; 利霸: XL-300、XL-600、XL-640、XL-1000; 雅培 C16000、ci4100、ci8200、ci16200; 西门子: ADVIA2400、ADVIA XPT、ADVIA1800
100mL(试剂1: 2×40mL + 试剂2: 1×20mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、006、008AS; 贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800; 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR; 罗氏: MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702; 美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L7280、MS-L8060、MS-L8000; 迈瑞: BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800、BS-2000M; 利霸: XL-300、XL-600、XL-640、XL-1000; 雅培 C16000、ci4100、ci8200、ci16200; 西门子: ADVIA2400、ADVIA XPT、ADVIA1800
38mL(试剂1: 1×30mL + 试剂2: 1×8mL)	罗氏 MODULAR
75mL(试剂1: 1×60mL + 试剂2: 1×15mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、006、008AS; 贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800; 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR; 罗氏: MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702; 美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L7280、MS-L8060、MS-L8000; 迈瑞: BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800、BS-2000M; 利霸: XL-300、XL-600、XL-640、XL-1000; 雅培 C16000、ci4100、ci8200、ci16200; 西门子: ADVIA2400、ADVIA XPT、ADVIA1800
300mL(试剂1: 4×60mL + 试剂2: 2×30mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、006、008AS; 贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800; 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR; 罗氏: MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702; 美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L7280、MS-L8060、MS-L8000; 迈瑞: BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800、BS-2000M; 利霸: XL-300、XL-600、XL-640、XL-1000; 雅培 C16000、ci4100、ci8200、ci16200; 西门子: ADVIA2400、ADVIA XPT、ADVIA1800
600mL(试剂1: 8×60mL + 试剂2: 2×60mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、006、008AS; 贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800; 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR; 罗氏: MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702; 美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L7280、MS-L8060、MS-L8000; 迈瑞: BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800、BS-2000M; 利霸: XL-300、XL-600、XL-640、XL-1000; 雅培 C16000、ci4100、ci8200、ci16200; 西门子: ADVIA2400、ADVIA XPT、ADVIA1800
100mL(试剂1: 1×80mL + 试剂2: 1×20mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、006、008AS; 贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800; 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR; 罗氏: MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702; 美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L7280、MS-L8060、MS-L8000; 迈瑞: BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800、BS-2000M; 利霸: XL-300、XL-600、XL-640、XL-1000; 雅培 C16000、ci4100、ci8200、ci16200; 西门子: ADVIA2400、ADVIA XPT、ADVIA1800
200mL(试剂1: 2×80mL + 试剂2: 2×20mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、006、008AS; 贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800; 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR; 罗氏: MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702; 美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L7280、MS-L8060、MS-L8000; 迈瑞: BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800、BS-2000M; 利霸: XL-300、XL-600、XL-640、XL-1000; 雅培 C16000、ci4100、ci8200、ci16200; 西门子: ADVIA2400、ADVIA XPT、ADVIA1800
150mL(试剂1: 2×60mL + 试剂2: 1×30mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、006、008AS; 贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800; 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR; 罗氏: MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702; 美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L7280、MS-L8060、MS-L8000; 迈瑞: BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800、BS-2000M; 利霸: XL-300、XL-600、XL-640、XL-1000; 雅培 C16000、ci4100、ci8200、ci16200; 西门子: ADVIA2400、ADVIA XPT、ADVIA1800
1×60T(试剂1: 1×17.2mL + 试剂2: 1×4.3mL)	西门子: DADE DIMENSION RXL、DADE DIMENSION AR、6×60T(试剂1: 6×17.2mL + 试剂2: 6×4.3mL)
70mL(试剂1: 2×28mL + 试剂2: 2×7mL)	DADE DIMENSION EXL、DADE DIMENSION X-PAND
140mL(试剂1: 4×28mL + 试剂2: 4×7mL)	麦迪卡 EasyRA
1×200T	罗氏: Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702; 日立 3500、006、008AS
4×400T	罗氏: Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702
2×450T	
2×625T	
700T	西门子: ADVIA2400、ADVIA XPT、ADVIA1800
1000T(试剂1: 2×500T + 试剂2: 1×1000T)	
1×220T	西门子: Atellica
2×440T	日立 3500、006、008AS; 西门子: Atellica
4×440T	日立 3500、006、008AS
1×400T	罗氏: Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702; 日立 3500、006、008AS

【预期用途】

用于血清中游离脂肪酸(NEFA)浓度的定量测定。

【检验原理】

游离脂肪酸和辅酶 A 在乙酰辅酶 A 合成酶 (ACS) 的作用下反应生成乙酰辅酶 A。乙酰辅酶 A 在乙酰辅酶 A 氧化酶 (ACOD) 的作用下生成 H₂O₂，随后通过色原在过氧化物酶 (POD) 的作用下生成有色底物。

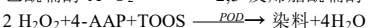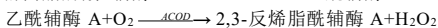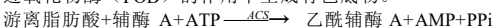

染料的吸光度与样本中游离脂肪酸的浓度成正比。

【主要组成成分】

试剂	成分	含量
试剂 1	三羟甲基氨基甲烷缓冲液	0.1mol/L
	辅酶 A	25g/L
	腺苷三磷酸	5mmol/L
	乙酰辅酶 A 合成酶	500U/L
	氯化镁	5 mmol/L
试剂 2	4-氨基安替比林	5mmol/L
	三羟甲基氨基甲烷缓冲液	0.1mol/L
	色原	10mmol/L
	乙酰辅酶 A 氧化酶	10KU/L
	过氧化物酶	85KU/L

不同批次的试剂不推荐混合使用。

【储存条件及有效期】

试剂在2~8℃避光保存可稳定1年。试剂不得冷冻。试剂开瓶后, 2~8℃避光保存可稳定2周。运输注意冷藏, 不可高温运输。生产日期和使用期限见标签。

【样本要求】

1.血清(空腹>12小时)。

2.血液采集后应及时分离血清并立即检测, 因为游离脂肪酸的浓度会由于脂解作用升高。如不能立即检测须将样本放于-20℃保存。不可使用已被污染的样本, 不可使用肝素治疗患者的血浆和肝素抗凝血浆样本。

3.干扰物质: 维生素 C ≤25 mg/dL, 血红蛋白 ≤11.07 g/L, 结合胆红素 ≤20 mg/dL, 非结合胆红素 ≤80mg/dL, 甘油三酯 ≤11.5mmol/L 对检测结果无影响。

【检验方法】

试剂配制

本试剂为液体, 可直接使用。

测定条件

主波长	546nm	反应温度	37℃	反应方向	向上
副波长	600nm	反应方法	终点法		

操作步骤

样本	4μL
试剂 1	200μL
混匀, 37℃孵育 5min, 读取吸光度 A ₁	
试剂 2	50μL
混匀, 37℃孵育 5min, 读取吸光度 A ₂ , 计算 ΔA = A ₂ - A ₁	

全自动生化分析仪程序自带参数编辑功能, 需要参照上表基本参数并结合所使用的生化分析仪型号进行设定。具体机型的分析参数可咨询我司。

校准程序

按照生化分析仪操作手册中的校准程序操作。建议使用本公司校准品。

- 1.本产品使用时一般采用两点校准。
- 2.校准品按其说明书操作。
- 3.生化分析仪可根据校准结果自动绘制校准曲线。
- 4.每7天或当发生以下情况时, 建议重新校准: 变更试剂批号; 质控值发生显著偏移; 生化分析仪进行了较大的维护。
- 5.各实验室可根据具体情况制定自己的校准程序。

质量控制程序

质控品按其说明书操作, 每天进行一次质控实验。

计算

$$\text{NEFA 浓度 (mmol/L)} = \frac{\Delta A_{\text{测定}} - \Delta A_{\text{空白}}}{\Delta A_{\text{校准品}}} \times C_{\text{校准品}}$$

【检验结果的解释】

没有尽快检测的样本, 脂解作用会导致结果偏高。样本浓度超过线性范围时, 请用生理盐水稀释4倍后重新测定, 检测结果乘以4再报告数据。血液游离脂肪酸具有个体差异, 进食后会升高。

仪器加样针、比色杯、管路等未清洗干净时可能对试验结果产生影响。

反应曲线异常时需进行确认。干扰物质超出限度时需进行确认。

【产品性能指标】

外观: 试剂 1 为无色至淡黄色液体; 试剂 2 为黄色液体。

试剂空白吸光度: 波长 546nm, 光径 10mm, 空白吸光度 ≤0.1500。

分析灵敏度: 样本浓度为 1.0mmol/L 时, 吸光度差值为 0.0800~0.2000。

精密性: 批内 CV ≤10.0%; 批间相对偏差 ≤10.0%。

线性范围: 0.01~2.0mmol/L 范围内: a) 线性相关系数 (r) 应 ≥0.990; b) (0.01~0.6) mmol/L 范围内, 绝对偏差应 ≤0.1mmol/L; (0.6~2.0) mmol/L 范围内, 相对偏差应 ≤15.0%。

准确度: 回收率应在 (100±20%) 范围内。

【注意事项】

- 1.仅供科学研究使用。若不慎溅到人体表面如皮肤、眼睛等, 必须用清水冲洗, 如果误食则需到医院治疗。
- 2.试剂盒中部分原料来源于动物和微生物, 使用时请做好防护措施并严格执行实验操作规程。所有废弃物应按当地法规要求处理。
- 3.使用前请仔细阅读说明书。

